

Vitaltest



Sensibilitätstestung:

- Die korrekte Behandlung basiert auf einer korrekten Diagnose, ebenso was die Bestimmung des Vitalitätszustandes der Zahnpulpa betrifft.
- Die Verwendung von Kohlendioxidschnee (Temperatur -78°C) zur Pulpatestung haben bereits Obwegeser und Steinhäuser 1963 sowie Ehrmann 1977 empfohlen. Diese Methode ergibt die zuverlässigsten Resultate. Die Treffsicherheit wird mit über 95% angegeben.

Vorgehen:

Aus einer Druckflasche lässt man flüssiges CO₂ durch ein Spezialventil expandieren. Das CO₂ verfestigt sich dabei zu Trockeneis. Mit Hilfe eines speziellen transparenten Schneerohres lässt sich der Kohlendioxidschnee komprimieren und auf einfache Weise die Zahnvitalität testen.

Vorteile:

- Sehr schnelles und sparsames Arbeiten, da nur so viel CO₂-Schnee gemacht wird, wie für die Testung notwendig ist.
- Problemloses füllen des transparenten Schneerohres ohne CO₂ Verlust.
- Gebogenes Schneerohr für den olaren Bereich.
- Der CO₂-Schnee gleitet im Schneerohr leicht und fällt trotzdem nicht heraus.

Notwendige Ausrüstung:

- Eine CO₂-Flasche mit Tauchrohr und möglichst grossem Inhalt.
- Wandhalterung, Fahrgestell oder Stativ für die CO₂-Flasche.
- Wandsteckdose.

Bank / Banque: Credit Suisse
CH-8810 Horgen
Konto / Compte: 792 800-31, Cl.-Nr. 4355
IBAN: CH28 0483 8079 2800 3100 0
PC / CCP: 80-12322-0
E-Mail: info@maxstaeubli.ch
Webseite: www.maxstaeubli.ch

MEDIZINISCHE GERÄTE
APPAREILS MÉDICAUX
MEDICAL APPARATUS



Max Stäubli AG

Spätzstrasse 14

8810 Horgen

Telefon: 044 728 80 40

Fax: 044 728 80 41

Technische Daten:

Spannung: 230v / 50 HZ
Leistung: 9W
Gewicht: 1.85 Kg
Kabellänge: 2m



Bank / Banque: Credit Suisse
CH-8810 Horgen
Konto / Compte: 792 800-31, Cl.-Nr. 4355
IBAN: CH28 0483 8079 2800 3100 0
PC / CCP: 80-12322-0
E-Mail: info@maxstaeubli.ch
Webseite: www.maxstaeubli.ch

MEDIZINISCHE GERÄTE
APPAREILS MÉDICAUX
MEDICAL APPARATUS



Max Stäubli AG

Spätzstrasse 14

8810 Horgen

Telefon: 044 728 80 40

Fax: 044 728 80 41

12) Vitaltest

17.01.2020

Seite 1

12.1 Vitaltest



12.2 Zubehör

12) Vitaltest

17.01.2020
Seite 2

12.1 Vitaltest

VT100000a Vitaltest komplett mit 2m Kabel, Schneerohrträger, 2 Schneerohre gerade, 2 Schneerohre gebogen, 1 Stopfer, 1 Gabelschlüssel



VT100000b Vitalitätstestgerät, Grundmodell ohne Schneerohre, Stopfer und Schneerohrträger



VT100000c Vitalitätstestgerät mit Schneerohrträger, ohne Zubehör
(Schneerohre und Schneestopfer)



12) Vitaltest

17.01.2020

Seite 3

12.2 Zubehör

VT100030 Schneestopfer



VT100003 Schneerohr gerade, ohne Stopfer



VT100010 Schneerohr gebogen, ohne Stopfer



VT100009 Schneerohrträger



VT100034 Gabelschlüssel SW 30



Technische- und Preisänderungen vorbehalten. Die Bilder können vom Artikel abweichen.